

# SenSura<sup>®</sup> Mio Click 2-delsbandage


Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care



## 1. Ta bort basplattan

Den använda påsen avlägsnas långsamt och förstiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan.

**Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den.** Dra/rolla försiktigt häftan nedåt samtidigt som du trycker lätt mot huden med den andra handen.

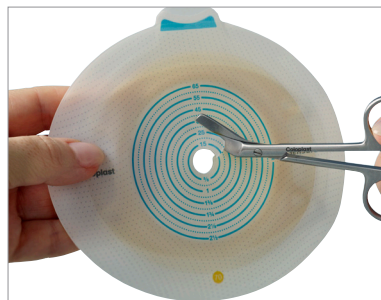

## 2. Klipp rätt storlek.

Rita av stomins form och storlek på klippguiden. Klipp sedan till rätt storlek med hjälp av en böjd sax. Det är viktigt att hålet i häftan passar perfekt runt stomin. För att undvika läckage och hudirritationer är det väldigt viktigt att hålet är klippt så att hela huden runt stomin är täckt. **OBS!** Häftan ska inte klämma mot stomin.



## 3. Ta bort skyddsfilmen

Avlägsna skyddsfilmen genom att sätta tummen på den turkos fliken på basplattan och dra bort skyddsfilmen.



## 4. Applicera basplattan

Applicera basplattan över stomin och **tryck lätt med fingrarna på plattan i 30-60 sekunder** för att säkerställa att häftan fäster ordentligt och att den passar perfekt på huden runt stomin.



## 5. Placera påsen på basplattan

Säkerställ att låsringen är öppen, Fäst ihop påsen och plattan med början nedifrån.



## 6. Kontrollera att den sitter rätt

Med början längst ner på påsen för du sakta dina pekfingrarna uppåt med ett lätt tryck, tills du känner att påsen är säkert applicerad på basplattan.




## 7. Stäng låsringen.

Tryck ihop den vågformade låsringen på bilden tills du hör ett ljudligt "klick". Klicket säkerställer att påsen sitter ordentligt fast på basplattan.

## Byta påse

Det är viktigt att veta när påsen sitter säkert fast på basplattan och när du kan ta av den. Med hjälp av klickkopplingen hör du ett tydligt "klick" när påsen kan tas av.

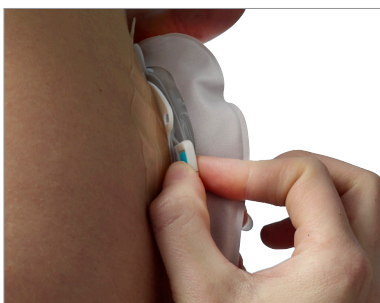

### 1. Öppna låsringen



### 2. Ta av påsen

Avlägsna påsen försiktigt genom att dra den uppåt och utåt från basplattan.





### 3. Ny påse

Tvätta rent basplattan och applicera därefter en ny påse. Stäng låsringen igen.

## Tryck och tid - två viktiga parametrar

När häftan appliceras mot huden är det viktigt att "massera" fast häftan mot huden **under 30-60 sekunder** med ett lätt tryck. Börja innerst mot stomin och fortsätt sedan över hela plattan. Trycket gör att häftan fäster in ordentligt mot alla veck och rynkor som kan finnas i huden, och sitter därmed säkrare.

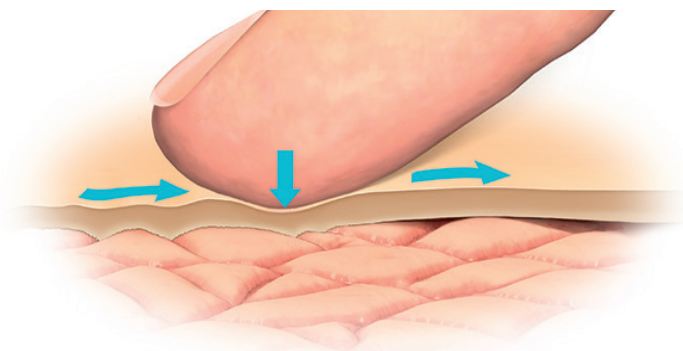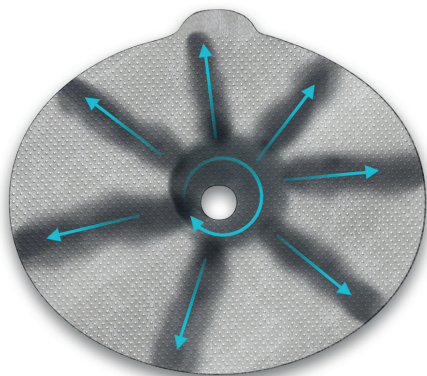

### Mät diametern på din stomi regelbundet

Var uppmärksam på att din stomi kan ändra storlek och form, särskilt under den första tiden efter operationen. Ändrar stomin storlek ska du även ändra storleken på hålet du klipper i häftan.

Mät därför din stomi med jämna mellanrum. **OBS!** Vissa storlekar finns redan med färdiga hål och behöver inte klippas.

Uppliver du problem med läckage kan det vara så att du behöver ändra på storleken på hålet i häftan.

## Brava®

### Brava® Häftborttagning

#### Häftborttagning som inte svider

Häftborttagning används för att underlätta borttagning av stomihäftan utan att påverka vidhäftningen av nästa stomihäfta. Den svider inte och finns både som spray och våtservett.

